

■取扱説明書 5点支持ステッキ つえたった

(JTS-1-R右手用/JTS-1-L左手用)

保証書付



注意

この「取扱説明書」には、製品を安全にお使いいただき転倒を未然に防止するための注意事項と使用方法を記載しております。製品をお使いになる前に、必ずこの「取扱説明書」を十分お読みいただき、使用方法を守って正しくお使いください。また、お読みになった後もいつでも確認できる場所に大切に保管してください。



注意

安全にご使用いただくために、以下のことを必ずお守りください。


- ・身体に合った杖をお選びください。
- ・ご使用前に各部を点検し異常がないことをご確認の上ご使用ください。
- ・ご使用中も含め、支柱の継ぎ目や調節部が確実に固定されたことをご確認ください。
- ・濡れた路面、または凍った路面では滑りやすいためご注意ください。
- ・歩行補助等、本来の用途以外ではご使用にならないでください。
- ・火気、熱源等には近付けないでください。変形、変質、燃える恐れがあります。
- ・ゴムチップは消耗品ですので、すり減りやひび割れ等があれば交換してください。
- ・ゴムチップの交換は別売の専用替ゴムチップをご使用ください。
- ・ゴムチップの交換には工具が必要です。別途プラスドライバーをご用意ください。
- ・修理、交換用ゴムチップのご用命は、お買い求めの販売店へお申し付けください。
- ・ご使用後は柔らかい布等で汚れを拭き取り、湿気のない場所で保管してください。

株式会社JT-senior

〒679-2153 兵庫県姫路市香寺町田野1017-45

TEL 079-232-7616 FAX 079-232-2009

杖の長さについて

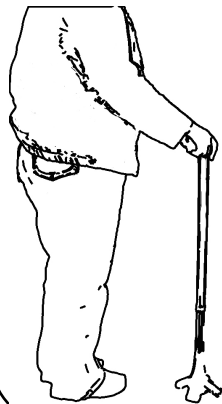

杖の先を足先の前外方に20cmにおき、肘は30~40°屈曲した位置にくるように杖をつく状態が正しい杖の長さの目安となります。また、福祉用具専門相談員等の専門職の意見も参考にし、て調節してください。

長さ調節方法

ロックキャップを緩め、ロックピンを指で強く押さえながら、脚先を上下させて、ご使用になる方の身長や腕の長さに合わせて高さを調節してください。

ロックピンが高さ調節穴から突出しているのを確認し、最後にロックキャップをしっかり締めて固定してください。



注意

- ロックピンが正しく調節穴に入っていないと、急に縮んで転倒等の事故につながる恐れがあります。
- 極端に斜めにして使用しないでください。
- 杖先ゴムが5点全て接地した状態以外では、杖に体重をかけないでください。
- 右手用は右手で、左手用は左手でご使用ください。

仕様

製品型番：JTS-1-R・JTS-1-L

長さ：伸縮サイズ 650~880mm

シャフト径：外径22mm 内側19mm

ベース：直径 140mm

重量：528g

材質：握り/ABS樹脂 フレーム/アルミニウム合金

別売：替ゴム(JTS-1-SR)

センターゴム1個 羽ゴム4個入り

保証書

商品名	つえ たった
型番	JTS-1-R JTS-1-L <small>(該当型番にチェックをお願い致します)</small>
保証期間	お買い上げ日より1年間
お買い上げ日	年 月 日
販売店	
お客様	ご住所
	お名前
	お電話番号

1. この保証書は本記載内容で無償修理を行うことをお約束するものであり、本製品を使用しての事故や物損を保証するものではありません。
2. 保証期間中に取扱説明書、その他注意書きに従った正しい使用方法で故障した場合には無償修理いたしますので、お買い上げの販売店に商品と本保証書をご持参ご提示の上ご依頼ください。
3. 保証期間内であっても下記に該当する場合は、有償修理となります。
 - 使用上の誤りや不当な改造や修理、不注意による使用での故障および損傷。
 - 適切は維持管理を行わなかったことに起因する塗装の剥がれ、サビや変色、消耗部品の故障や損傷。
 - お買い上げ後の落下や輸送による故障や損傷。
 - 火災、風水害、地震、落雷、その他天変地異による故障や損傷。
 - 本書のご提示がない場合。
4. 本書は日本国内でのみ有効です。
5. 本書は再発行致しませんので大切に保管してください。